

# COLDISEPT

SK



## NANO SILVER

### Ušné kvapky



#### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zdravotnícka pomôcka vo forme ušných kvapiek používaná na podpornú liečbu zápalu vonkajšieho zvukovodu spôsobeného bakteriálnou alebo plesňovou infekciou. COLDISEPT nanoSILVER ušné kvapky sú určené na vonkajšie použitie k zmäkčeniu a odstráneniu nečistôt a k vytvoreniu ochranej bariéry na povrchu pokožky. Prípravok obsahuje nanočastice striebra a medi, ktoré potláčajú rast baktérií a plesní. COLDISEPT nanoSILVER ušné kvapky podporujú liečbu zápalu vonkajšieho zvukovodu rôzneho pôvodu.

#### ZLOŽENIE

Čistená voda, glycerín, propylénglykol, nanočastice koloidného striebra, nanočastice koloidnej medi.

#### VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Vedľajšie účinky zdravotníckej pomôcky COLDISEPT nanoSILVER ušné kvapky nie sú známe, napriek tomu však, najmä u citlivých osôb, nie je možné vylúčiť alergické príznaky. V prípade, že sa objaví alergická reakcia, ukončíte používanie produktu.

Akákoľvek závažná udalosť súvisiaca s touto zdravotníckou pomôckou musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému národnému orgánu.

**Príslušný národný orgán pre zdravotnícke pomôcky v SR:** Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná ul. 11, SK-825 08, Bratislava 26.

#### ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPOZORNENIA

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na ktorúkoľvek jeho zložku.

Nepoužívajte prípravok, ak máte perforovaný ušný bubienok.

Neukladajte aplikátor príliš hlboko do ušného kanálika.

Zabráňte kontaktu s očami a ústami.

Ukončíte používanie prípravku v prípade výskytu znepokojujúcich príznakov.

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti!

Tehotné ženy a deti do 6 rokov môžu prípravok používať len pod lekárskej dohľadom.

#### POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Používajte COLDISEPT nanoSILVER ušné kvapky 3 x denne a po vymiznutí príznakov zápalu ešte najmenej 3 dni.

Fľaštičku mierne nahrejte (najlepšie v rukách).

Ľahnite si na bok, postihnutým uchom nahor.

Kvapkajte do zvukovodu 5 kvapiek (ak vám lekár neodporučil inak) a zostaňte v tejto pozícii ešte aspoň 3-5 minút.

Používajte pravidelne podľa individuálnych potrieb.

#### UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Balenie 15 ml

#### VÝZNAM SYMBOLOV:

LOT	Číslo šarže	i	Pozri návod na používanie		Výrobca
	Použiteľné do		Dátum výroby	25 °C	Horná hranica teploty

Dátum poslednej revízie textu: 1.9.2020

**ARKONA Laboratorium**  
Farmakologii Stomatologicznej,  
Nasutów 99C, 21-025 Niemce, Poľsko

**Vyrobené v EU pre:**  
**Alpen Pharma AG,**  
Bern, Švajčiarsko

